

EVOLVEO

FitBand B3

Tisztelt ügyfelünk! Köszönjük, hogy az EVOLVEO FitBand B3 készüléket választotta.

Első lépések

Üdvözöljük a B3, a színes kijelzős karpánt világában, amely stílusosan motiválja Önt céljai elérésére.

A B3 csomag tartalma:

B3 egység és 2 karpánt

A B3 készülék két részből áll: a B3 egységből és a karpántból. Karpántok további színekben önállóan kaphatók.

A B3 karpánt beállítása

Először is hozza létre a saját EVOLVEO Fit fiókját, és győződjön meg róla, hogy a B3 egység át tudja vinni az összegyűjtött adatokat az alkalmazás irányítópultjára. Az irányítópult az a hely, ahol beállíthatja céljait, és elemezheti a korábbi adatokat. Ismerje fel a trendeket, tartson lépést a barátaival stb. Amint befejezte a karpánt beállítását, kezdheti a mozgást.

A B3 egység felhasználói fiókja megkérdezi az Ön magasságát, súlyát és nemét, hogy el tudja végezni a legkülönbözőbb számításokat. A neve és az átlagos lépésszám alapértelmezetten látható valamennyi B3-barátja számára.

A B3 egység beállítása mobil eszközön

Az ingyenesen elérhető EVOLVEO Fit alkalmazás kompatibilis az iOS 8.0 vagy magasabb verziójával és az Android 4.4 vagy magasabb verziójával, több, mint 150 mobilkészülék-operációs rendszerrel.

LETÖLTHETŐ ALKALMAZÁSOK



EVOLVEO Fit



EVOLVEO Fit


1. Készülékétől függően az alábbi helyek egyikén találja meg az EVOLVEO Fit alkalmazást.
 - Apple APP STORE iOS-os eszköz (iPhone) esetén
 - Google PLAY STORE Androidos eszköz esetén

Támogatás:

BT4.0 kompatibilis iOS 8.0 vagy magasabb verziójával és az Android 4.4 vagy magasabb verziójával

2. Telepítse az alkalmazást, nyissa meg, regisztráljon és jelentkezzen be a fiókjába, és az alkalmazás egy sor utasítással vezetni fogja Önt.
3. Kövesse a megjelenő utasításokat, és csatlakoztassa vagy párosítsa B3 egységét a mobileszközével. Párosítással meggyőződhet róla, hogy a B3 egység tud kommunikálni a mobileszközzel (adatok szinkronizálása oda-vissza).

Kattintson az alkalmazásra -> Eszköz -> válassza az EVOLVEO FitBand B3 opciót

4. Amint a karpánton megjelenik a , nyomja hosszan az érintőfelületet és hagyja jóvá, az alkalmazásban nyomja meg a Párosítás opciót.
(Megjegyzés: ha iOS felhasználóként nem sikerül a FitBand B3 karpántot párosítani, ellenőrizze a telefon beállításait – Bluetooth -> FitBand B3 -> Eszköz elfelejtése.)

Az érintőkijelző használata




A karpánt cseréje

A karpánt két önálló részből (B3 egység és pánt) áll, a pánt külön kapható és tetszőlegesen cserélhető.

A karpánt levétele

A karpánt levétele:

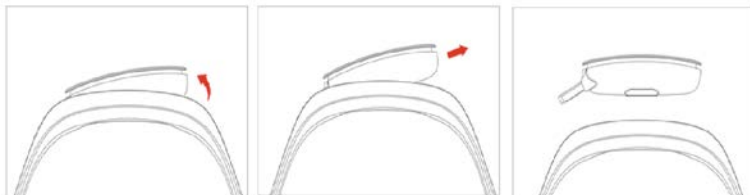



Útmutató a töltéshez

Kizárólag 5V USB töltő támogatott!

Ne használjon más feszültséggel rendelkező USB töltőt.

Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, néhány másodperccel a B3 egység felébresztése után megjelenik a lemerült akkumulátor ikonja.

Megjegyzés: Mielőtt a B3 egységet tölteni kezdi, győződjön meg róla, hogy az egység száraz, és nincs a közelében folyadék, mint pl. ital, víz stb. Ellenkező esetben könnyen rövidzárlat következhet be.



Az akkumulátor töltöttségét bármikor ellenőrizheti közvetlenül a B3 egységén, vagy az EVOLVEO Fit alkalmazáson keresztül.

Az egység töltése:

A számítógép vagy CE/UL USB-portjába dugja be az engedélyezett USB töltőt.

A B3 egység kijelzőjén megjelenik az elem ikon. Az elem ikon 3 másodperc után eltűnik.



A teljes feltöltés kb. 1-2 óráig tart. Az egység töltése közben rákoppintva ellenőrizheti akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha az egység teljesen fel van töltve, a kijelzőn feltöltött elem ikonja látható.

*Megjegyzés: Számítógépről való töltés esetén ügyeljen rá, hogy az egység kijelzője lefelé mutasson.

Automatikus követés a B3-mal

A B3 egység folyamatosan figyelemmel kíséri a különböző állapotokat, ha a karpánt a karján van. Az információ minden alkalommal átkerül az irányítópultra, amikor a két készüléket szinkronizálja.

A teljes napi állapot megjelenítése

Koppintson az egységre, és jelenítse meg az alábbi teljes napi állapotokat:

- Lépések
- Pulzusszám
- Vérnyomás
- Megtett távolság
- Elégetett kalóriák

Az EVOLVEO Fit alkalmazásban további, az Ön B3 egysége által feljegyzett információkat is talál, mint

- az időjárás
- az alvási előzmények, beleértve az alvás időtartamát és minőségét
- a pulzusszám (BPM), az átlagos nyugalmi pulzusszám és a dinamikus pulzusszám 15/30/60/120 perc alatt, az Ön beállításaitól függően
- az edzési előzmények
- a fényképezőgép kioldógombjának távvezérlése
- riasztás
- tevékenység figyelmeztető
- elvesztés riasztó

Megjegyzés: éjfélkor a B3 egység visszaáll alapállapotba és új napot kezd.



Ismerkedés a kijelző kezelésével

Csúsztassa az ujját fel/le

Üzem módváltás / a kijelző felébresztése



Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig

Belépés a tesztoldalra



Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig

Visszalépés a fő felületre



Érintse meg a kijelzőt
Kattintson a kijelzőre és ellenőrizze az állapotot

A vérnyomás mérése

Előkészületek a mérés megkezdése előtt

Annak érdekében, hogy pontosan tudjon mérni a FitBand B3 nyomásmérő rendszerével, tartsa be az alábbi utasításokat:

1. A mérés megkezdése előtt 30 perccel ne fürödjön, ne dohányozzon, ne tornázzon, ne igyon alkoholt, koffeint, és ne is egyen.
2. A stressz megemeli a vérnyomást, ezért ne végezzen mérést stresszhelyzetben.
3. A mérést nyugodt helyen kell végezni. Üljön le egy székre talpával a talajon. Egyenesen üljön, a hátát és a kezét támassza meg. Maradjon nyugalomban, és a mérés alatt ne beszéljen.

A vérnyomásmérés megkezdése

1. Lépjen be a Vérnyomásmérés felületre.



Hosszan nyomja meg a gombot, majd a B3 egység elkezdja a mérést. A vizsgált ujját nyomja a képernyőre, ne túl erősen, de ne is túl gyengén.

2. Néhány másodperces mérést követően a B3 egység kijelzőjén az alábbi módon jelenik meg az eredmény.



3. Ha az eredmények túlságosan eltérőek (>10 mmHg), a mérést ismételje meg.

* A B3 egység nem számít orvosi/diagnosztikai készüléknek. Csal vérnyomása alakulásának megfigyelésére szolgál személyes célokból.

Ha nem jelenik meg semmilyen eredmény a vérnyomásmérés során, a legvalószínűbb okok a következők:

1. Nem jött létre megfelelő kontaktus az optikai érzékelő és a vizsgált ujj bőre között.
2. A vizsgált kéz/ujj az elégtelen vérkeringés miatt túl hideg.

A fenti okok alapján az alábbi megoldásokat javasoljuk:

- (1) 1. módszer: Nyomja erősebben az egyik hüvelykujját a B3 egység képernyőjére, hogy javuljon az érintkezés az optikai érzékelő és a vizsgált ujj bőre között.
- (2) 2. módszer: Javítsa a perifériás vérkeringést a vizsgált kézben/ujjban. Ha gyakran hideg a keze/ujja vagy rossz a vérkeringése, próbálja néhány percig tornáztatni a kezét, hogy a mérés előtt élénkítse a vérkeringést.

A kéztornáztatás módja:

1. lépés: Tartsa a kezét maga előtt, és rázza, hogy növelje a vér áramlását.
2. lépés: Szorítsa ökölbe a kezét, és tartsa így 10 másodpercig, majd engedje el.
3. lépés: Ezt a gyakorlatot néhányszor ismételje meg.

A tornához érdemes valami rugalmas tárgyat, gumilabdát, csuklóerősítőt használni.

A B3 egység frissítése

A termék tökéletesítéséhez és a funkciók fejlesztéséhez szabadon hozzájuthat a firmware frissítésével. Javasoljuk, hogy időben frissítse a B3 egységet.

Amint rendelkezésre áll a firmware frissítése, az **EVOLVEO Fit --- Készülék --- Firmware frissítés** alkalmazásban megjelenik egy piros pont, amely frissítésre szólítja fel. Amint a frissítés elindul, az EVOLVEO Fit alkalmazásban és a B3 egységen megjelenik egy folyamatjelző, ami a frissítés befejezéséig látszik.

A frissítés ideje alatt a karpántot és a mobilkészüléket tartsa egymás közelében.

Megjegyzés: a B3 egység frissítése néhány percig tart, és megterhelheti az akkumulátort. Ezért javasoljuk, hogy a frissítést akkor végezze, ha a B3 egység teljesen fel van töltve.

Kikapcsolás és gyári beállítások

Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, a következő módon járjon el. Állítsa a képernyőt az alapállapotba, vagyis dátum- és időmegjelenítésre. Nyomja kb. 2 másodpercig a kijelzőt, amíg meg nem jelenik egy kis „1” számjegy. Nyomja ismét kb. 2 másodpercig a kijelzőt, amíg meg nem jelenik egy kis „2” számjegy. További 2 másodperces nyomásra megjelenik egy „3” számjegy. Ismétlje meg ezt negyedszer is, és megjelenik az „off” ikon. Végül nyomja még egyszer 2 másodpercig a kijelzőt, és az egység kikapcsol.

Ha az egységet vissza akarja állítani a gyári beállításra, ismétlje meg ugyanezt, de az utolsó lépésben csak röviden nyomja meg a kijelzőt, és megjelennek a gyári beállítások. Ezután ismét nyomja a kijelzőt 2 másodpercig, és az egység visszaáll a gyári beállításokra. Minden mért adat törlődik, és a karpánt nullától kezd el mérni. A gyári beállítás után a harmadik funkció a rezgés kontrollja. Ezt a kijelző 2 másodperces megnyomásával lehet be- és kikapcsolni.

Specifikáció

Tömeg	21 g
Akkumulátor	Poly-Li
Bluetooth	BT 4.0
Kijelző	0,96” IPS képernyő
Vezérlés	Érintőfelület
Bluetooth jel	8-10 m
Vízállóság	3 ATM

A B3 egységgel kapcsolatos problémák megoldása

Hiányzik a pulzusszám jel

A B3 egység folyamatosan figyeli a pulzusát edzés közben és egész nap. Időnként probléma merülhet fel a jó jel keresése során. Ilyen esetben ott, ahol általában a pulzusszám látható, egy szaggatott vonal jelenik meg.

- Ha a karpánt nem érzékeli a pulzusszámot, először ellenőrizze, hogy megfelelően van-e feltéve. Csúsztassa a csuklóján felfelé vagy lefelé, vagy húzza meg ill. lazítsa ki a pántot.
- Azután egy kis ideig tartsa a karját nyugalomban, egyenesen, és a pulzusszám valószínűleg újta megjelenik.

- Ha a pulzusszám érzékelése még mindig nem működik, ellenőrizze a pulzusszám beállításait az alkalmazásában, és ellenőrizze, hogy a funkció On (Bekapcsolva) vagy Auto üzemmódba van-e állítva.

Váratlan viselkedés

Amennyiben nem sikerül a mobillkészüléket a karpánttal párosítani, lépjen be a **Bluetooth beállításokba**. Ha a telefonon látja a B3 egység jelét, az azt jelenti, hogy a Bluetooth jel megfelelően működik. Ellenőrizze, nincs-e a készülék másik mobillal párosítva. Ha igen, az alkalmazáson keresztül szüntesse meg a párosítást. Ha iOS-t használ, még egy lépést meg kell tennie. Lépjen **A telefon beállításai --- Bluetooth --- Eszköz elfelejtése** menüpontra, majd végezze el újra a párosítást.

Mentességi rendelkezések

1. A B3 egység által mért pulzusszám és vérnyomás adatok nem orvosi diagnózis célját szolgálják.
2. Az öndiagnosztika és az öngyógyítás veszélyes, csak szakképzett orvos állapíthatja meg és gyógyíthatja a magas vérnyomást vagy más szívbetegségeket. Részletesebb diagnózisért forduljon kezelőorvosához.
3. Lehet, hogy a B3 egység segítségével mért pulzusszám és vérnyomás adatok nem egészen pontosak, és különböző tényezők hatására túlléphetik a tűréshatárt, ahogy a fenti specifikációban szerepel. Ennek oka lehet interferencia külső forrásokból érkező jellel, a karpánt nem megfelelő pozícióban való viselése, az időjárás változásai vagy a felhasználó kondíciójának változása.
4. Ne módosítsa a gyógyszereszedést vagy a gyógymódot a B3 egység mérései alapján. Bármilyen kezelés vagy gyógyszeresedés megkezdése előtt konzultáljon orvossal.

SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK AZ ILYEN HELYTELEN
VISELKEDÉSÉRT ÉS AZ ILYEN ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁNAK
KÖVETKEZMÉNYEIÉRT.

Jótállási feltételek

A B3 egységre a vásárlástól számított 2 éves jótállási idő vonatkozik. Amennyiben a termék normál használat mellett hibás vagy sérült, amit a vállalatunk által meghatalmazott műszaki szakember is megerősít, a vállalat ingyenes javítást biztosít.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Először olvassa el a „FAQ - Gyakori kérdések“ részt a:

www.evolveo.com/hu/fitband-b3 címen, vagy kérje az EVOLVEO cég műszaki támogatását.

EVOLVEO - MŰSZAKI TÁMOGATÁS

<http://www.evolveo.com/hu/tamogatas>

A jótállás NEM VONATKOZIK az alábbiakra:

- a nem megfelelő használat által okozott mechanikus sérülések
- a nem szakképzett személy által végzett javítások okozta károk
- akkumulátor kapacitásának csökkenése 6 hónapnyi használat után (6-havi garancia az akkumulátor üzemidejére)
- véletlen vagy mesterséges károsodás
- mesterséges károsodás által okozott foltok a terméken
- a termék szokásos előregedése élettartamának előrehaladtával
- egyéb beavatkozással okozott károk.



Megsemmisítés

Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejárta után szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO FitBand B3 termék megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a <ftp://ftp.evolveo.com/ce> oldalon.

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Minden jog fenntartva.

A termék szerkezete és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.